

TESTE DE UREASE



Luckmann
PRODUTOS SANEANTES

TESTE DE UREASE PARA DIAGNÓSTICO DO H. PYLORI PRODUTO DIAGNÓSTICO DE USO IN VITRO

FINALIDADE

Produto para diagnóstico de uso in vitro, utilizado para a detecção da bactéria H. Pylori nos exames de endoscopia digestiva alta.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome: Teste de Urease
Nome comercial: Diagnóstico H. pylori
Registro na ANVISA 10308490059

COMPOSIÇÃO

Uréia, Bicarbonato de Sódio, indicador e agente de controle do pH.

UTILIZAÇÃO

1. Coleta-se os fragmentos da mucosa gástrica.
2. Inoculam-se os fragmentos no tubo do Teste de UREASE
3. Verifica-se a coloração.

A viragem ocorre de forma rápida, devendo sua leitura ser considerada até o tempo de no máximo 30 minutos. A mudança de coloração poderá ser total (todo o conteúdo do frasco) ou parcial (apenas ao redor da biópsia).



NEGATIVO a coloração permanecerá amarela



POSITIVO a coloração ficará rosa

OBSERVAÇÃO: o resultado do teste pode sofrer influência da ingestão de antibióticos, inibidores de bombas de prótons, compostos de bismuto e antagonista do receptor H2.